

ALKOMETRIT ALCOSCAN



motoral

Motoral Oy
Valuraudankuja 1
00700 HELSINKI
www.motoral.fi

Puhelin myynti 010 5507 100
Puhelin vaihde 010 5507 0
myynti@motoral.fi
webshop.motoral.fi

ALKOMETRIT ALCOSCAN

ALCOSCAN ALKOMETRI VALIKOIMA

Alkoholi vaikuttaa ajokykyyn ja ajoturvallisuuteen. Alkometri on hyvä apuväline selvittämään, koska voi alkoholin nauttimisen jälkeen lähteä ajamaan. Vastuu ajokyvystä on kuitenkin aina kuskillä.

ALCOSCAN alkometrit ovat puhallustestejä eli ne mittaavat alkoholin määrän uloshengitysilmaasta. Puhallustesti kertoo, montako milligrammaa alkoholia on litrassa uloshengitysilmaa. Alkometrit ilmoittavat mittaustuloksen promilleina, jolloin on helppo päätellä onko ajokykyinen. Alkometri antaa tarkan tuloksen, kun henkilö puhaltaa vähintään yhden litran verran ilmaa ulos. Tämä on minimi määrä, koska vain keuhkojen alaosassa olevan ilman alkoholipitoisuus kertoo veren alkoholipitoisuudesta. Alkometriin ei koskaan saa puhaltaa liian nopeasti alkoholin nauttimisen jälkeen. Tämä voi vaurioittaa tai jopa rikkoa alkometrin. Liian pian otettu puhallustesti ei ole myöskään totuudenmukainen. Odota noin 20 minuuttia ennen puhallustestin tekemistä. Älä myöskään tupakoi, syö tai juo tuona aikana. Näin varmistat mahdollisimman luotettavan mittaustuloksen.

Kaikkia alkometrejä tulee käyttää ohjeiden mukaan ja huoltaa säännöllisesti. Säännöllinen huolto varmistaa, että laite toimii ja antaa luotettavia lukemia. Oikein käytettynä ALCOSCAN alkometrit ovat pitkäikäisiä ja luotettavia laitteita.

ALCOSCAN alkometri valikoimassa on sekä puolijohdesensoreilla että polttokennosensoreilla varustettuja alkometrejä. Alla lisätietoja valikoimassa olevista alkometreistä.

- **ALCOSCAN GT ja AL8800** ovat laadukkaalla polttokennosensorilla varustettuja alkometrejä. Polttokennosensori takaa luotettavan mittaustuloksen. Laite tulee kalibroida säännöllisesti, vaikkei sitä käytettäisikään aktiivisesti. Laitteissa käytetään pestäviä suukappaleita tai ALCOSCAN paperisia suukappaleita.
- **ALCOSCAN AL7000** on laadukas alkometri, jossa on puolijohdesensori. Sensorin voi vaihtaa itse (laite ilmoittaa vaihdon tarpeesta), eikä laitetta näin ollen tarvitse kalibroida. Laitteessa käytetään pestäviä suukappaleita tai ALCOSCAN paperisia suukappaleita.
- **ALCOSCAN AL2500** on edullinen, helppokäyttöinen perustason alkometri. Alkometrissä on puolijohdesensori ja laite voidaan kalibroida. Alkometriä käytetään ilman suukappaletta.

	AL2500	AL7000	AL8800	GT
Ean koodi	6417196774099	6417196774105		8809165240366
Mitat (KxIxS) mm	104x40x20	105X50X18	97,5x53,8x18	67,8x20,4x51,5
Paino (sis.paristot)	85g	98g	83g	65,6g
Suukappale	Ei	5*	5*	5*
Säilytyspussi + kantohihna	Ei	Kyllä	Ei	Ei
Kalibrointi	Kyllä	Ei**	Kyllä	Kyllä
Mittausväli	0.00-4.00‰	0.00-4.00‰	0.00-4.00‰	0.00-4.00‰
Näyttö	LCD	LCD	LCD	LCD
Sensori	Puolijohdesensori	Puolijohdesensori	Polttokennosensori	Polttokennosensori
Virtalähde	2kpl AA paristot*	2kpl AA paristot*	2kpl AAA paristot*	1kpl AAA paristot*
Käyttölämpötila	+5 - +40°	+5 - +40°	+5 - +40°	+5 - +40°
Säilytyslämpötila	0 - +50°	0 - +50°	0 - +50°	0 - +50°

* sis.pakkauksessa

** sensorimoduulin vaihto korvaa kalibroinnin

ALKOMETRI ALCOSCAN GT BLACK




Alcoscan GT on kooltaan pieni ja helppokäyttöinen, laadukkaalla polttokennosensorilla valmistettu alkometri. Laitetta on helppo käyttää ja kuljettaa mukana. Laitteen mukana tulee avaimenperä, jossa voi säilyttää ja kuljettaa suukappaletta. Suukappalet ovat pestäviä. Laitetta käytetään yhdellä painikkeella. Laite voidaan kalibroida.

- Laitteen koko 67,8x20,4x51,5mm
- Paino 65,5g
- LCD näyttö
- Mittausväli on 0,00-4,00‰.

Tuotekoodi: 59700090

Ean koodi: 8809165240366

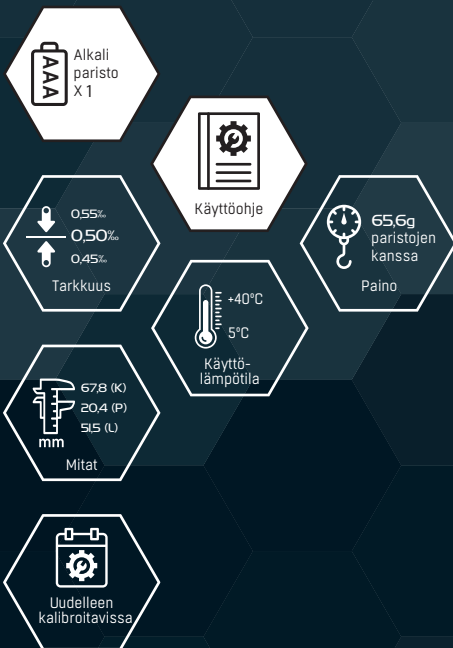

ALKOMETRI ALCOSCAN AL8800

WEBSHOP

AL8800 on laadukkaalla polttokennosensorilla varustettu alkometri. Laitteessa yhdistyy ammattilaiskäyttöön tarkoitetun laitteen laatu ja luotettavuus sekä kannettavan laitteen helppokäyttöisyys. Alkometriä käytetään yhdellä painikkeella ja siinä käytettävät suukappaleet ovat pestäviä.

- Laitteen koko 97,5x53,8x18mm
- Paino 83g
- Valaistu LCD näyttö
- Oma kotelo kuljettamista varten
- Mittausväli on 0,00-4,00‰.

Tuotekoodi: 59700080



ALKOMETRI ALCOSCAN AL7000

WEBSHOP

AL7000 on laadukas alkometri, jossa on puolijohdesensori. Sensorin voi vaihtaa itse, eikä laitetta näin ollen tarvitse kalibroida. Alkometriä käytetään yhdellä painikkeella ja siinä käytettävät suukappaleet ovat pestäviä. Alkometri on helppo kuljettaa mukana omassa kotelossaan.

- Laitteen koko 105X50X18mm
- Paino 98g
- Valaistu LCD näyttö
- Oma kotelo kuljettamista varten
- Mittausväli on 0,00-4‰.

Tuotekoodi: 59700073

Ean koodi: 6417196774105

Sensori

Tuotekoodi: 59700062

Suukappale 10kpl

Tuotekoodi: 59700066



Sensorin vaihto-ohje

Avaa alkometrin takapuolella oleva luukku ja poista vanha sensori.

Laita uusi sensori omalle paikalleen ja paina kevyesti. Sulje luukku.



ALKOMETRI ALCOSCAN AL2500



AL2500 on helppokäyttöinen perustason alkometri, jolla teet puhallustestin ilman suukappaletta. Laite voidaan kalibroida. Laitetta käytetään yhdellä painikkeella. Pienikokoinen ja kevyt alkometri on helppo kuljettaa mukana.

- Laitteen koko 104x40x20mm
- Paino 85g
- Valaistu LCD näyttö
- Mittausväli on 0,00-4‰.

Tuotekoodi: 59700070

Ean koodi: 6417196774099

Suukappale 10kpl

Tuotekoodi: 59700066



Alkali
paristo
X 2



Käyttöohje



0.10‰
0.40‰
0.70‰

Tarkkuus



85g
paristojen
kanssa

Paino



+40°C
5°C

Käyttö-
lämpötila



10,4cm (K)
2cm (P)
4cm (L)

Mitat



Uudelleen
kalibroittavissa

ALKOMETRIT ALCOSCAN

ALCOSCAN ALKOMETRIT – TAKUUKÄSITTELYOHJE JÄLLEENMYYJÄLLE

Alcoscan alkometrit ovat laadukkaita, helppokäyttöisiä ja kestäviä alkometrejä. Oikein käytettynä ja säilytettynä, laitteen tarkkuus pysyy hyvänä pitkän aikaa ja käyttöikä pitenee. Laitteen käyttöohjetta tulee aina noudattaa, jotta se toimii oikein ja antaa luotettavia lukuja. Käyttöohjeen vastainen menettely johtaa takuun raukeamiseen.

Kaikilla ALCOSCAN alkometreillä on 2 vuoden tuotevirhetakuu ostopäivästä alkaen.

Toimi seuraavasti, jos alkometri tulee takuukäsittelyyn takuuajan sisällä.

- Pyydä asiakkaalta takuu- tai ostokuitti ja varmista, että takuu on voimassa.
- Selvitä, miksi asiakas tuo laitetta takuukäsittelyyn.
 - o Mikäli laite (AL2500, AL5500, AL8800, GT) näyttää huomattavasti todellisesta lukemasta poikkeavia lukemia, tulee laite kalibroida. Kalibroinnin tarve määräytyy laitteen käytöstä, mitä useammin laitetta käyttää, sitä useammin se tulee kalibroida. Myös laitteen käyttämättömyys saattaa vaikuttaa lukemiin, laite on silloin hyvä kalibroida. Vasta hankittua alkometriä ei ole tarpeen kalibroida. Kalibrointi ei välttämättä saata laitetta kuntoon, jos laitteeseen on kohdistunut isku tai jos laitetta on käytetty käyttöohjeiden vastaisesti esim. puhaltamalla alkometriin välittömästi alkoholin nauttimisen jälkeen. Laitetta ei tule säilyttää esimerkiksi auton hansikaslokerossa suurten lämpötilanvaihtelujen/iskuvaaran johdosta. Laitteeseen puhallettu tupakansavu saattaa vaurioittaa alkometrin sensoria pysyvästi. Kalibrointi ei kuulu takuun piiriin, eli asiakas maksaa kalibroinnin. Alkometrit kalibroidaan maahantuojaan, Motal Oy:n toimesta. Lisätietoja Alcoscan alkometrien kalibroinnista saa kalibrointiohjeesta.
 - o AL7000 alkometrin näyttäessä huomattavasti todellisesta poikkeavia lukuja tai laite ilmoittaa sensorin vaihtotarpeesta, on laitteeseen syytä vaihtaa sensori. Sensorin vaihto ei kuulu takuun piiriin. Sensori on helppo vaihtaa ja siihen on olemassa oma ohje (AL7000 sensorin vaihto), jonka mukaan vaihto onnistuu kotikonstein. Varmista, että myymälässä on aina vaihtosensoreita.
- Valmistusvirheen ilmetessä, laitteen huolto kuuluu takuun piiriin takuuehtojen puitteissa. Takuutapauksissa jälleenmyyjän tulee dokumentoida laitteen vika takuuhakemus -lomakkeeseen ja lähettää takuuhakemus maahantuojalle (Motal Oy) ellei ole toisin sovittu. Lisää hakemukseen myös kopio ostokuitista.

Takuuhakemus löytyy >> <https://webshop.motal.fi/ohjeet/takuu-ja-palautus/>

- Älä lähetä alkometriä suoraan Motalille. Jos pyydämme lähettämään laitteen, maksamme myös sen kuljetuksen. Toimita takuuhakemus liitteineen: Motal Oy / Takuu, Valuraudantie 18, 00700 Helsinki tai takuu@motal.fi. Olemme yhteydessä, kun takuuhakemus on käsitelty.

Takuu ei kata käyttöohjeista poikkeavista käyttötavoista johtuvia laitevaurioita.
Yhteydenotot ja lisätiedot: 010 5507 300 / takuu@motal.fi

ALKOMETRIT ALCOSCAN



AL2500



AL5500



AL8800



GT

ALCOSCAN ALKOMETRIEN AL2500, AL5500, AL8800 JA GT KALIBROINTI

Alcoscan alkometrit ovat laadukkaita, helppokäyttöisiä ja kestäviä alkometrejä. Oikein käytettynä ja säilytettynä, laitteen tarkkuus pysyy hyvänä pitkän aikaa ja käyttöikä pitenee.

Kalibrointi on tarpeen laitteen näyttäessä huomattavasti todellisesta lukemasta poikkeavia lukemia tai laitteen pyytäessä kalibrointia. Kalibroinnin tarve määräytyy laitteen käytön mukaan. Mitä useammin laitetta käytetään, sitä useammin laite täytyy kalibroida. Myös laitteen käyttämättömyys saattaa vaikuttaa lukemiin ja laite on silloin hyvä kalibroida. **HUOM! Laitteen kalibrointi ei kuulu takuun piiriin.**

Kalibrointi ei välttämättä saata laitetta kuntoon, jos laitteeseen on kohdistunut isku tai jos laitetta on käytetty käyttöohjeiden vastaisesti esim. puhaltamalla alkometriin välittömästi alkoholin nauttimisen jälkeen. Laitetta ei tule säilyttää esimerkiksi auton hansikaslokerossa suurten lämpötilanvaihtelujen/iskuvaaran johdosta. Laitteeseen puhallettu tupakansavu saattaa vaurioittaa alkometrin sensoria pysyvästi.

Alkometrit kalibroidaan maahantuojan, Motoral Oy:n toimesta. Laite lähetetään osoitteeseen:
Motoral Oy / Kalibrointi, Valuraudankuja 1, 00700 Helsinki.

Kalibroinnin hinta on 39,95€ (sis. alv 25,5%) / laite. Mahdolliset toimituskulut lisätään laskuun (6 € lähetyskulut jos alkometri lähetetään annettuun osoitteeseen kalibroinnin valmistuttua). Lähetämme laskun kalibroinnista sähköpostitse ja laskun maksamisen jälkeen laite lähetetään annettuun osoitteeseen. Vaihtoehtoisesti alkometri voidaan noutaa noutomyyntipisteestämme osoitteesta: Motoral Oy, Valuraudantie 18, 00700 Helsinki (avoinna arkisin klo 8-16). Kalibroinnin voi tällöin maksaa maksukortilla. Noudettavien laitteiden osalta ilmoitamme puhelimitse kalibroinnin/ huoltotoimenpiteen valmistuttua. Huomioitahan, että kalibroinnissa kestää 2-7 vrk.

Täyttäkää seuraavat tiedot:

_____ KPL MALLI: AL2500 AL5500 AL8800 GT

NIMI _____

OSOITE _____

PUHELIN _____

TOIMITUSTAPA: noudan laitteen Laite lähetetään minulle (lähetyksku 6€)

Vastaanottaja täyttää:

VASTAANOTETTU PVM. _____

VASTAANOTTAJA _____